



**US
DENTAL
DEPOT**

US DENTAL DEPOT

6555 NW 9th Avenue suite 212
Fort Lauderdale 33309
Florida USA

USA - 1 1866 625 5558 – 1 954 874 6325

Colombia 57 1 489 9051

Peru 51 1 707 3444

Venezuela 58 212 729 1639

Argentina 54 11 5258 7148 Cba 54 351 569 1409

www.USDENTALDEPOT.com



ECCO LIGHT-S-II

Item # 101921

Puntos Atractivos

1. 1400 mW/ cm²
2. Led de alta intensidad: 5W
3. Inalámbrica
4. 450-470 nm
5. Guía de fibra óptica
6. Programa de Polimerizado: 3 funciones
7. Pila Recargable
8. Tiempo de Carga: 2 hrs. aprox
9. Metálica y a la vez ligera
10. Apagado automático

Instalacion

1. Ponga la base de la lámpara sobre un lugar sólido, y conecte el cargador a la corriente eléctrica, ponga la lámpara en la base de cargador, el indicador sobre la base de cargador indicará el estado de la batería.
2. Si el indicador de la base de la lámpara esta en rojo, esto significa que la batería esta baja o se esta cargando, cuando este indicador en verde, significa que se ha terminado de cargar la batería, en la mayoría, el tiempo de carga de la batería es de aprox. De 1 a 2 horas.

Descripcion De Funcion

La siguiente descripción le ayudará usar su equipo rápido y correctamente:

1. En el cuerpo hay 1 Display , que le ayudara a comprender su funcionamiento



**US
DENTAL
DEPOT**

US DENTAL DEPOT

6555 NW 9th Avenue suite 212
Fort Lauderdale 33309
Florida USA

USA - 1 1866 625 5558 – 1 954 874 6325

Colombia 57 1 489 9051

Peru 51 1 707 3444

Venezuela 58 212 729 1639

Argentina 54 11 5258 7148 Cba 54 351 569 1409

www.USDENTALDEPOT.com

ENCENDIDO Boton P

MODOS DE FUNCIONAMIENTO Boton M

Display	Marca	Función
1		Pulsante
2		Rampa
3		Fuerte

POTENCIAS Boton R

3. Base:

Cuando coloque la lámpara en su base, el Led de la base le indicará el estado de la batería.

90	90 %
70	70%
50	50%

TIEMPO DE TRABAJO Boton T

DISPLAY	Tiempo
10	10 seg.
20	20 seg.
30	30 seg.
40	40 seg

6. Apagado automático

a lámpara se apagará automáticamente si deja de trabajar durante 3 minutos, presionando el botón de ON/OFF, se encenderá de nuevo.